

MONTRE PARLANTE

Manuel d'utilisation


Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Caractéristiques :

Montre analogique. Annonce vocale de l'heure en français (format 24H) grâce à sa fonction parlante (jusqu'à 80 dB).

Fonctions : annonce de l'heure automatique, alarme et calendrier

Alimentation : 1 pile CR2025 (fournie).

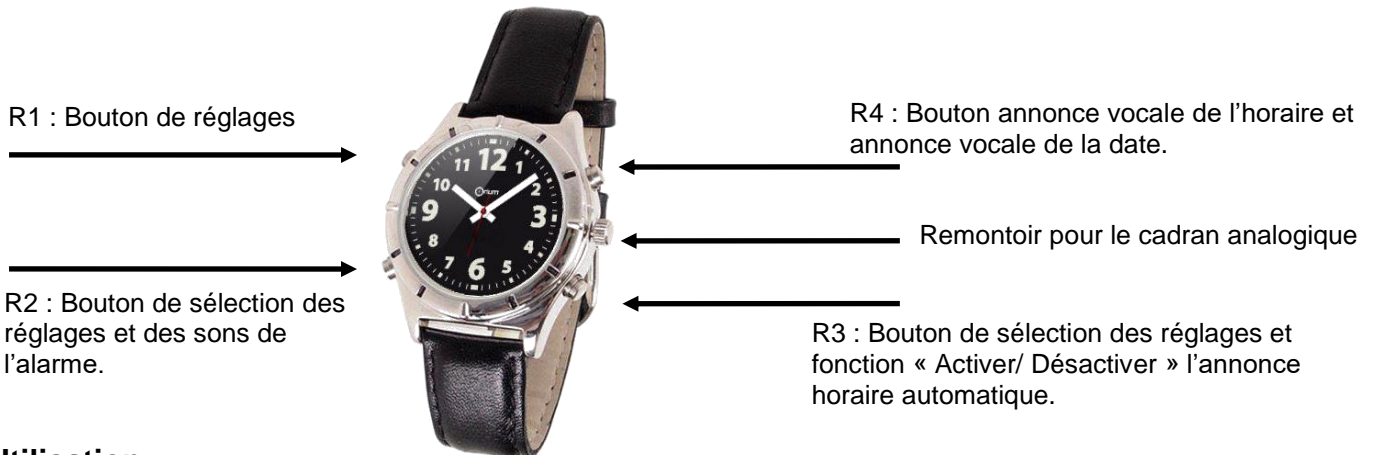

Utilisation :

La montre parlante est conçue pour annoncer l'heure, l'alarme, le calendrier et les indications vocales lors des réglages.

Pour utiliser correctement la montre parlante, suivre les différentes étapes de réglages suivantes.

Lors de la première utilisation, pour activer la montre, effectuer un appui long sur la touche R4 jusqu'au bip sonore. Puis procéder aux réglages.

Etape 1 : Réglage de l'heure de l'alarme.

Appuyer sur R1.

Appuyer sur R2 pour faire défiler jusqu'à l'heure souhaitée de l'alarme.

Appuyer sur R3 pour faire défiler jusqu'aux minutes souhaitées de l'alarme.

Appuyer sur R4 pour écouter les paramètres sélectionnés et indiquer le statut de l'alarme (activée ou désactivée).

Pour passer au paramétrage suivant, appuyer sur R1. L'annonce vocale indique le paramétrage suivant.

Etape 2 : Réglage de l'heure.

Appuyer sur R2 pour faire défiler jusqu'à l'heure souhaitée.

Appuyer sur R3 pour faire défiler jusqu'aux minutes souhaitées.

Appuyer sur R4 pour écouter les paramètres sélectionnés.

Pour passer au paramétrage suivant, appuyer sur R1. L'annonce vocale indique le paramétrage suivant.

Etape 3 : Réglage de l'année.

Appuyer sur R2 pour avancer ou R3 pour diminuer jusqu' à la sélection souhaitée.
Pour passer au paramétrage suivant, appuyer sur R1. L'annonce vocale indique le paramétrage suivant.

Etape 4 : Réglage du Mois et de la Date.

Appuyer sur R2 pour faire défiler jusqu'au Mois souhaité.
Appuyer sur R3 pour faire défiler jusqu'à la Date souhaitée.
Appuyer sur R4 pour écouter les paramètres sélectionnés.

Lors du paramétrage de l'année, du mois et de la date, le jour de la semaine sera automatiquement synchronisé pour la fonction calendrier.

Réglage de l'horaire sur le cadran analogique : ôter le plastique de protection (rouge) du remontoir, tirer sur le remontoir et faire tourner les aiguilles (dans le sens horaire) pour indiquer l'heure exacte correspondant à l'horaire vocal précédemment paramétré. Après réglage, repousser le remontoir pour le remettre dans sa position initial.

Attention : régler les aiguilles au même horaire que l'horaire vocal paramétré.
L'horaire vocal n'est pas synchronisé lors du changement de l'horaire sur le cadran analogique.

Attention : pendant les réglages, si aucun bouton n'est activé pendant plus de 10 secondes, un bip sonore est émis et la montre passe en mode veille.
Pour reprendre un réglage à une étape spécifique, appuyer successivement sur le bouton R1 jusqu'au paramétrage souhaité.

En mode veille (hors paramétrages) :

- Pour l'annonce vocale de l'heure : appuyer une fois sur le bouton R4.
- Pour l'annonce vocale du calendrier, appuyer deux fois successivement sur le bouton R4.
- **Pour activer ou désactiver l'annonce de l'heure automatique :** appuyer sur le bouton R3 jusqu'à au mode souhaité. L'utilisateur choisit d'activer ou désactiver l'annonce vocale toutes les heures.
- **Pour activer l'alarme :** l'utilisateur dispose de 3 sons au choix pour l'alarme. Appuyer successivement sur le bouton R2 jusqu'au son souhaité pour l'alarme.
- **Pour désactiver l'alarme :** appuyer successivement sur le bouton R2 jusqu'à la sélection « Alarme Désactivée ».

Lorsque l'alarme est activée et sonne : l'annonce vocale indique l'heure et la sonnerie est émise pendant une minute puis s'arrête automatiquement. L'utilisateur peut appuyer sur le bouton annonce vocale de l'horaire (R4) pour arrêter l'alarme.

Changement de piles

Lors de l'utilisation, si le niveau sonore de l'annonce vocale devient faible ou ne fonctionne pas et si l'horaire sur le cadran analogique ne fonctionne pas, cela indique que la pile est usée. Changer la pile. Il est recommandé d'effectuer le changement de pile auprès d'un professionnel. Ôter le couvercle situé à l'arrière de la montre et remplacer la pile en respectant les polarités. Replacer le couvercle. S'assurer que le couvercle est correctement positionné.

Conditions d'utilisation et sécurité

Utiliser la montre parlante pour l'usage prévu.

Le produit n'est pas étanche. Ne pas immerger dans l'eau ou produit liquide.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation, entretien ou changement de piles.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
L'heure n'est pas annoncée automatiquement toutes les heures.	Activer la fonction annonce automatique.
L'alarme ne sonne pas à l'heure souhaitée.	Vérifier que l'alarme est activée. Vérifier l'heure et les minutes paramétrées pour l'alarme.
L'annonce du calendrier n'est pas correcte.	Vérifier les paramètres enregistrés pour l'année, le mois et la date.
Le cadran analogique ne fonctionne pas.	Vérifier que le plastique de protection (rouge) du remontoir est ôté. Vérifier que la pile est neuve et correctement installée.
L'horaire vocal annoncé ne correspond pas à l'horaire affiché sur le cadran de la montre.	Régler l'heure et les minutes pour l'annonce vocale puis régler le même horaire sur le cadran analogique. Les réglages ne sont pas synchronisés.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !