

# BARRE D'APPUI DE LIT AJUSTABLE

## Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.

La barre d'appui de lit a été conçue pour faciliter l'entrée et la sortie du lit pour l'utilisateur.

### Caractéristiques techniques et conditions d'utilisation :

- Fabrication en acier inoxydable.
- Hauteur totale ajustable de 78 à 98 cm sur 10 niveaux de réglages.
- Longueur ajustable de 84 à 112 cm sur 12 niveaux de réglages.
- Poignée équipée d'un revêtement en mousse ergonomique et antidérapant.

### Installation :

Sortir le produit de l'emballage et suivre les instructions. Le montage de la barre d'appui de lit ajustable ne nécessite aucun outil.

#### Liste des éléments inclus :

#### ① Grande barre en U x 1



#### ② Petite barre en U x 1



#### ③ Barres de pieds en L x 2



#### ④ Visserie x 2



**Etape 1 :** Placer les deux barres en L ③ de façon parallèle avec les trous de perforations orientés vers l'extérieur et insérer la petite barre en U ② par le haut. Insérer une vis ④ de chaque côté de la barre dans les perforations souhaitées afin de fixer l'ensemble.

**Attention :** Il est nécessaire que l'extrémité de la vis ressorte correctement afin de confirmer la bonne installation du produit. Il est nécessaire de placer les vis aux mêmes niveaux de perforations afin d'assurer la stabilité du produit et la sécurité de l'utilisateur.

**Etape 2 :** Insérer la grande barre en U ① dans les extrémités des barres en L ③. Appuyer sur les boutons presseurs afin de les placer dans les perforations souhaitées.

**Etape 3 :** Pour régler la hauteur, 5 niveaux de réglages sont disponibles aux pieds des barres en L ③ et 5 niveaux sont disponibles sur la petite barre en U ② : pousser sur les

boutons presseurs afin de les positionner dans les perforations souhaitées (vers le haut ou vers le bas).

Pour ajuster la longueur, pousser sur les boutons presseurs de la grande barre en U ① afin de les positionner dans les perforations souhaitées (12 niveaux de réglages).

**Etape 4 :** Placer la barre de lit sous le matelas. Ajuster la hauteur et la longueur si nécessaire comme indiqué à l'étape 3.

Attention : Il est nécessaire de placer les boutons presseurs aux mêmes niveaux de perforations afin que les barres soient ajustées à la même hauteur pour assurer la stabilité du produit et la sécurité de l'utilisateur.

Attention : Il est nécessaire de placer la barre sur une surface plane. Si la barre n'est pas correctement installée, n'est pas adaptée au lit ou ne correspond pas à la taille de l'utilisateur, ne pas utiliser le produit.



### **Conditions d'utilisation et sécurité :**

Utiliser la barre d'appui de lit ajustable pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

### **Résolutions des problèmes rencontrés :**

| <b><u>Défauts constatés</u></b>   | <b><u>Solutions / comment résoudre le pb</u></b>  |
|-----------------------------------|---|
| La barre de lit n'est pas stable. | Vérifier que la surface est plane.<br>Vérifier que les vis sont placées aux mêmes niveaux de perforations.<br>Ajuster la hauteur et la longueur de la barre selon la taille du matelas. |

