

LOUPE ELECTRONIQUE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

La loupe électronique (référence 25561) a été conçue pour apporter plus de confort aux personnes ayant des troubles de la vision.

Caractéristiques techniques :

- Large écran couleur (11 cm).
- 7 modes d'affichage couleur.
- Equipée de 4 LED blanches.
- Puissance de grossissement réglable.
- Fonction Figér l'image.
- Enregistrement sur carte micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie).
- Lecture du support sur écran TV.
- Alimentation : batterie lithium 3.7V 950 mAh.


Installation et utilisation :

Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les accessoires sont inclus.



- A** : Loupe électronique.
- B** : Batterie rechargeable.
- C** : Lingette de nettoyage.
- D** : Pochette de rangement.
- E** : Adaptateur 230 V.
- F** : Câble USB.
- G** : Câble vidéo.


- 1** : Bouton ON/OFF pour allumer/ éteindre la loupe.
- 2** : Boutons d'utilisation.
- 3** : Ecran.
- 4** : Pied.
- 5** : lentille.
- 6** : Compartiment de la batterie rechargeable.
- 7** : Port TV.
- 8** : Emplacement pour carte SD.
- 9** : Port de charge micro USB.
- 10** : Indicateur LED de charge de la batterie.

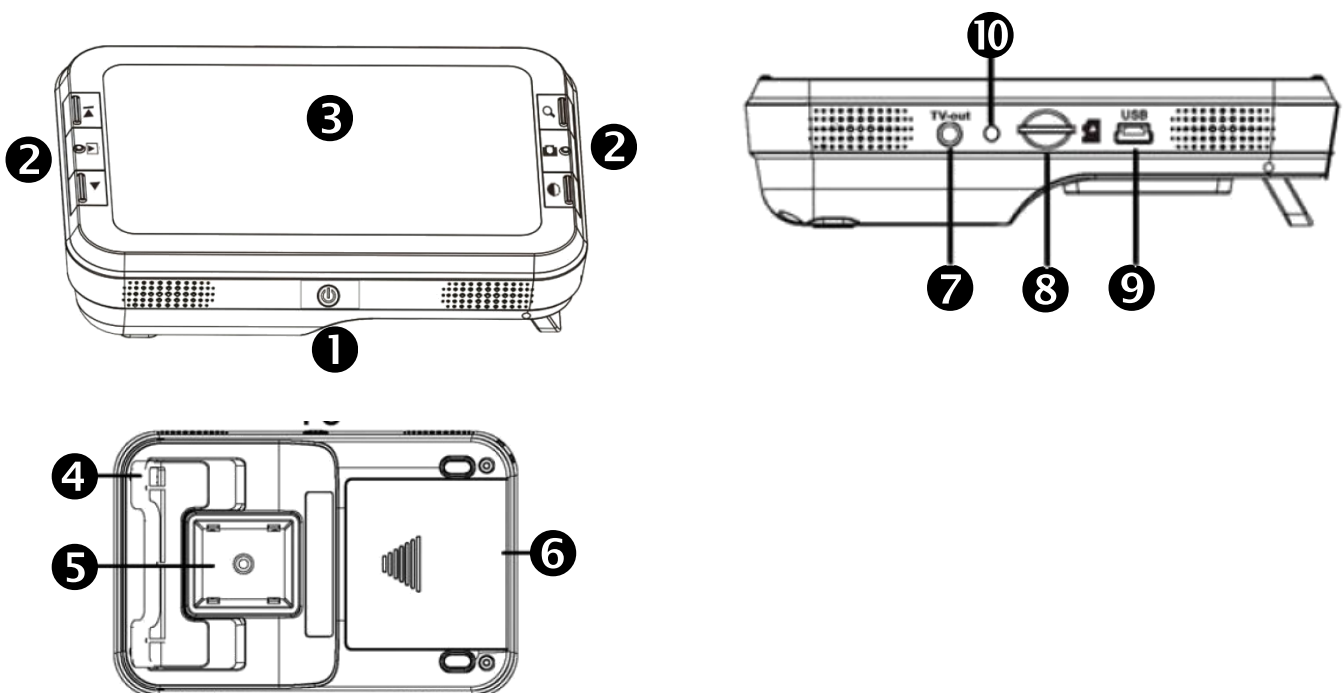

Charger la batterie.

1. Faire glisser le couvercle du compartiment de la batterie (6). Insérer la batterie (B) et respecter les polarités. Replacer le couvercle.
2. Insérer la prise USB du câble fourni (F) dans le port USB (9). Puis brancher l'adaptateur (E) sur une prise secteur (230V/ 50 Hz) : l'indicateur LED rouge (10) s'allume pour confirmer le chargement de la batterie. Lorsque cette dernière est complètement chargée, l'indicateur s'éteint. Débrancher la loupe.

Attention : charger complètement la batterie avant la première utilisation. L'autonomie de la loupe est d'environ 2H30. La loupe doit être éteinte lors du chargement de la batterie.

3. Un indicateur de niveau de batterie apparaît en bas à droite de l'écran (3). Lorsque l'indicateur clignote  cela signifie que la batterie doit être chargée.

Afin d'économiser la batterie, la loupe s'éteint automatiquement en cas de non utilisation (déplacement de la loupe pour la lecture ou appui sur un bouton) après un délai de 2 minutes.


4. Afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités de la loupe, il est recommandé d'utiliser une carte micro SD pour enregistrer les photos.


Utilisation

5. Déplier le pied (4) et placer la loupe sur le support de lecture. S'assurer que le support de lecture est sur un support plat afin de faciliter l'utilisation de la loupe et assurer un confort de lecture.

Appuyer sur le bouton (1) pour allumer la loupe : un écran d'accueil puis l'affichage du support apparaît et les LED s'activent automatiquement.


Placer la lentille (5) au-dessus du texte ou des images et faire glisser la loupe vers la droite pour lire le support.

Pour changer la puissance de grossissement : la loupe permet quatre puissances de x6 à x14. Appuyer successivement sur le bouton  pour choisir x6, x8, x10 et x14. Le niveau de puissance apparaît en bas à gauche de l'écran (3).


Pour sélectionner le mode de couleurs : la loupe permet de choisir parmi sept modes couleurs pour s'adapter à chaque utilisateur. Appuyer successivement sur le bouton  pour sélectionner :



- Couleurs réelles
- Noir sur Blanc
- Blanc sur Noir
- Jaune sur Noir
- Bleu sur Jaune
- Bleu sur Blanc
- Jaune sur Bleu

Pour figer une image : appuyer sur le bouton . Appuyer à nouveau pour reprendre la lecture.

Pour les fonctionnalités suivantes : Insérer une carte micro SD dans l'emplacement prévu (8). Respecter l'orientation de la carte. 

Pour capturer une photo : appuyer sur le bouton . La photo est automatiquement enregistrée sur la carte SD.

Pour lire les photos enregistrées sur la carte SD : appuyer sur le bouton  pour lancer les photos.

Puis appuyer sur les boutons  et  pour passer à l'image précédente ou suivante.

Appuyer à nouveau sur le bouton  pour retourner au mode loupe.

Pour visualiser le support de lecture de la loupe sur une télévision : Brancher la prise Jack 3.5 mm du câble fourni (G) dans l'emplacement (7) et brancher l'autre extrémité (embout jaune RCA Mâle) dans le port dédié (Prise jaune RCA Femelle d'entrée vidéo) de la télévision.

Pendant l'utilisation sur la télévision :

- L'écran de la loupe s'éteint pendant l'utilisation.
- Les autres fonctions (changement de grossissement, mode couleurs, figer l'image, capture photo et lire les photos) sont identiques.

Utiliser uniquement la lingette en microfibre (C) pour nettoyer l'écran et la loupe. Replier le pied (4) et utiliser la pochette (D) pour ranger et protéger la loupe.

Conditions d'utilisation et sécurité :

Utiliser la loupe électronique pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Entretien / sécurité :

Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des agents caustiques ou abrasifs.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le pb
L'écran ne s'allume pas.	Vérifier que la batterie est chargée.
La batterie ne charge pas.	Vérifier que la batterie est correctement installée. Vérifier que la prise secteur 230V fonctionne. La loupe doit être éteinte lors du chargement de la batterie. Appuyer sur le bouton (1).
L'écran s'éteint automatiquement.	Afin d'économiser la batterie, la loupe s'éteint automatiquement en cas de non utilisation (déplacement de la loupe pour la lecture ou appui sur un bouton) après un délai de 2 minutes.
La loupe n'enregistre pas les photos. Le message « no card » apparaît.	Insérer une carte SD. Vérifier la bonne insertion de la carte SD.
L'écran de la loupe n'apparaît pas sur l'écran de la télé.	Vérifier que le câble est correctement branché et connecté au bon emplacement de la connectique de la télévision. Vérifier que la loupe est allumée. Il peut être nécessaire de modifier la source et le canal de réception sur la télévision (TV, AV, AUX...).

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

